


Omniplast®

Kirurgisk textiltelj

Vid många tillfällen i vården behövs en tejp som sitter ordentligt på plats, det kan handla om förbandsfixering eller säkring av kanyler och sonder. Omniplast sitter stadigt på plats och låter samtidigt huden andas eftersom häftmassan är applicerad i strängar.

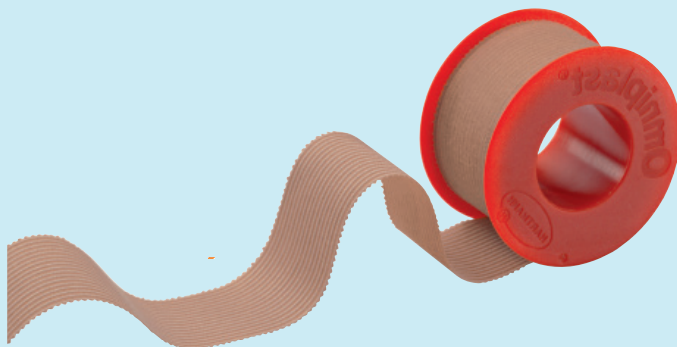

- 1 Säker fixering
- 2 För patienter med normal hud
- 3 Lämnar inga klisterrester
- 4 Enkel hantering
- 5 Fri från kolofonium och latex

Fördelar:

Säker fixering
Lätt att riva av
Enkel hantering
Fri från kolofonium och latex



Egenskaper

Omniplast är genomsläpplig för luft och fukt tack vare att häftmassan är applicerad i strängar. Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar inga klisterrester kvar på huden. Omniplast är lätt att riva av både på längden och tvären utan att tejpen fransar sig.

Material

100% viskosväv, vattenavvisande.
Häftmassan är baserad på syntetiskt gummi.
Fri från kolofonium och latex. Spole av polystyren.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Alla sorters förbandsfixering, även för kanyler, sonder och katetrar. Passar för patienter med normal hud. Försiktighet bör iaktas vid skör hud.

Fixeringsinstruktion

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Omniplast® På plastspole i ask	1,25 cm x 9,2 m	900 452	24 st	12 Afp
	2,5 cm x 9,2 m	900 453	12 st	16 Afp
	5 cm x 9,2 m	900 454	6 st	12 Afp