

Snäll mot huden

 **smith&nephew**
OPSITE[®] FLEXIFIX
GENTLE
Transparent Silicone Adhesive
Film Roll



Appliceringsguide



OPSITE Flexifix Gentle kan användas till:

- Fixera primärförband
- Fixering av slangar
- Skyddar huden mot friktion och yttre kontaminering, hjälper till att skydda huden från uppkomst av trycksår
- Lindrar smärtsam diabetesneuropati
- Skyddar huden runt stomier



OPSITE® Flexifix Gentle är en flexibel silikonfilm på rulle för patienter med ömtålig hud^{2,4,5}.

Filmen kombinerar god andningsförmåga¹, med att den är transparent och kan användas i upp till 7 dagar^{2,3}.

Silikonhäftmassan gör att filmen kan lyftas och placeras om utan att mista de vidhäftande egenskaperna. Bakterier kan inte tränga igenom filmen, vilket skyddar appliceringsstället från yttre kontaminering och möjliggör för patienten att duscha med förbandet på.

Appliceringssystem som utformats för enkel användning. Filmen kan klippas till efter behov⁶.



Fixering av slangar och drän

OPSITE Flexifix Gentle kan användas för att fästa kateterslangen.



Fixering av förband

OPSITE Flexifix Gentle kan användas som ett sekundär förband över ALLEVYN, MELOLIN och andra primära förband som ett skonsamt alternativ till traditionella filmer.




Skyddar ömtålig hud och utsatta områden

OPSITE Flexifix Gentle ger en effektiv barriär mellan huden och yttre ytor och skyddar huden.




Så här lätt är det:

1

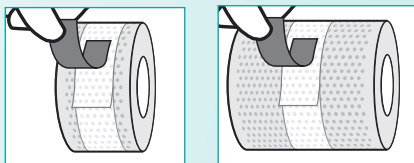


Ta bort den blå tapen och den genomskinliga skyddsremsan

2

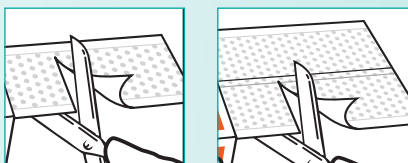


Klipp till önskad storlek

3

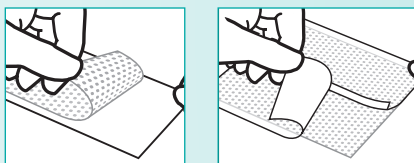

Ta bort skyddspappret från filmen

4

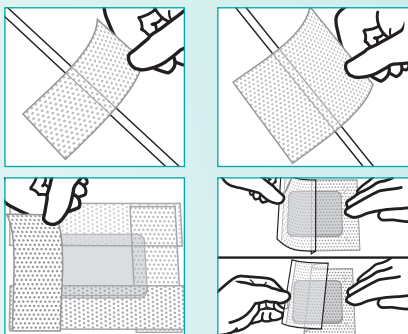

Applicera filmen och släta ut

OPSITE Flexifix Gentle kan lyftas och omplaceras utan att mista de vidhäftande egenskaperna.

10cm x 5m



Beställningsinformation

Artikel nr.	Storlek	Antal/fp
66801195	2.5cm x 5m	1
66801196	5cm x 5m	1
66801197	10cm x 5m	1

Wound Management
Smith & Nephew AB
Kräketorsgatan 20
Box 143
431 22 Mölndal

www.smith-nephew.com

*Varumärke tillhörande Smith & Nephew
™ Alla varumärken är godkända
© Smith & Nephew februari 2014
14-02520-SE

T +46 (0) 31 746 58 00
F +46 (0) 31 87 05 31

Referenser

- Analytical Report, DS.12.184.R – comparative Product Testing Flexix Gentle, 19/07/12, Daubney, L. *(in-vitro)*.
- VT Study Data of File (on ALLEVYN® Gentle Border) HVT050 04/12/08.
- Data on File Report Reference OR-DOF/017, An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing, Palmer S and Mistry C, June 2011.
- "Ageing changes in skin", update on 22/08/2006 by Sandra W. Cohen M.D. Ref <http://www.nim.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm>.
- Hurd, T *et al.*, A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3.
- WT1429/R9 Usability Study of Flexifix Gentle in comparison to Flexifix Technical Study Report, 21/09/2012, E Cole.