

# Det naturliga valet vid sårbehandling

Activon® medicinsk Manukahonung används vid behandling av alla typer av sår. Forskning visar att Manukahonung är idealisk för behandling av svårläkta sår och brännskador.

## Verkningsmekanismer

- ✓ Antiseptiskt
- ✓ Antiinflammatoriskt
- ✓ Osmotisk effekt
- ✓ Sänker pH-värdet i såret
- ✓ Minskar odör
- ✓ Bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö

## Användningsområden

- ✓ Trycksår
- ✓ Bensår
- ✓ Fotsår hos personer med diabetes
- ✓ Kirurgiska sår
- ✓ Brännskador (1:a och 2:a gradens)
- ✓ Kraftigt infekterade sår
- ✓ Djupa sår och fistelgångar
- ✓ Maligna tumörsår



www.sylak.se

## Activon® Manukahonung Sortiment



### Actilite®

Viskosnät med 99% Manukahonung och 1% Manukaolja

Art. nr.	Storlek
CR4281	5x5 cm
CR3849	10x10 cm
CR3852	10x20 cm
CR4366	20x30 cm
CR4367	30x30 cm
CR4368	30x60 cm



### Activon Tube®

100% Manukahonungs gel

Art. nr.	Storlek
CR3830	25 gram



### Activon Tulle®

Viskoskompress med 100% Manukahonung

Art. nr.	Storlek
CR3761	5x5 cm
CR3658	10x10 cm



### Algivon®

Alginat med 100% Manukahonung

Art. nr.	Storlek
CR3831	5x5 cm
CR3659	10x10 cm



### Algivon Plus®

Alginat med 100% Manukahonung

Art. nr.	Storlek
CR4230	5x5 cm
CR4225	10x10 cm
CR4231	2,5x20 cm (tamponad)

Sylak AB | Ekonomivägen 5  
SE-436 33 Askim, Sverige  
www.sylak.se | 031-748 49 50


# Activon® Manukahonung

## ANVÄNDARGUIDE

Förband för alla typer av sår

# Activon® Manukahonung

## Användarguide

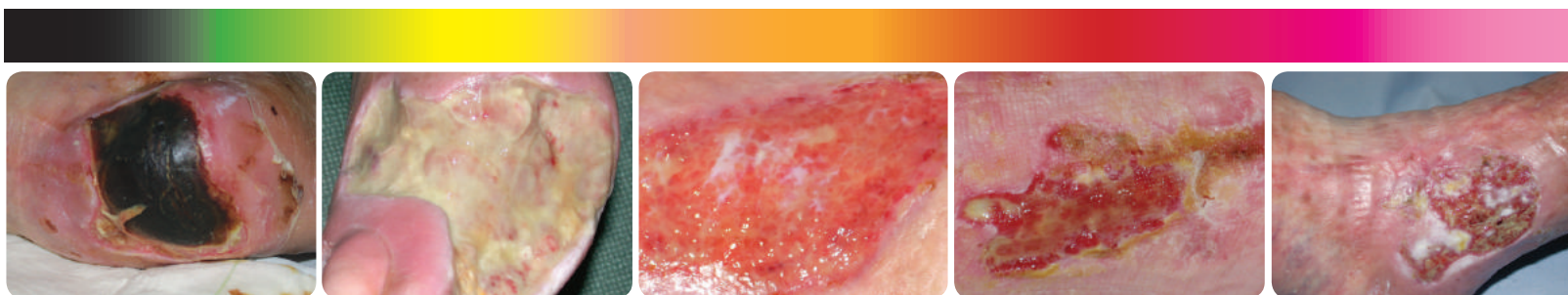

Typ	Nekrotiskt	Tjockt sårexsudat	Infekterat/Odör	Granulering	Epitalisering
<b>Syfte</b>	Debridera (om såret är torrt och ischemiskt konsultera expertråd)	Avlägsna tjockt sårexsudat	Reducera bakterie- halten Eliminera odör	Främja granulering	Bibehålla fuktig sårmiljö
<b>Produkt</b>	Algivon® Algivon® Plus Algivon® Plus Ribbon Activon® Tube	Algivon® Algivon® Plus Algivon® Plus Ribbon Activon® Tube	Algivon® Algivon® Plus Algivon® Plus Ribbon Activon® Tube Actilite®	Activon® Tulle Actilite®	Actilite®

Ren Manukahonung har ingen känd bakterieresistens och kan därför användas för att lokalt behandla alla typer av infekterade sår.

En produkt från 