

BOWIE DICK TEST FÖR AUTOKLAV

Vad är en Bowie Dick test?

Bowie Dick är en test för att visa att autoklaven verkligen tömmer ut all luft för bästa ångpenetration av packat material.

När man ska köra ett Bowie Dick test så ska kammaren vara tom, man låter endast brickan i mitten vara kvar där man placerar testpaketet.

Artikel: 190032 från Interster



HUR GÖR MAN DÅ?

- 1 Man ska se till så att kammaren är varm innan man gör testet, dvs man måste ha kört en vanlig cykel först innan man kan köra Bowie Dick testet.
- 2 Se till så att kammaren är tom, endast mittenbrickan ska vara kvar. Kontrollera så att förpackningen är hel, och att den ligger på rätt håll. Kontrollera även så att datumet på förpackningen är ok. Placera testet i mitten på brickan. Kör programmet för Bowie Dick test.
- 3 När programmet är färdigt, låt autoklaven svalna av lite och ta sedan ut testpaketet. Öppna paketet och kontrollera färgomslaget i mitten på förpackningen. Färgomslaget kan se lite olika ut beroende på vilken tillverkare som tillhandahåller Bowie Dick testerna. Se bild
- 4 Om första testet misslyckas, så ska man köra ett nytt test igen för att kontrollera så att det inte var en engångshändelse.



Om man återigen inte får ett bra resultat så ska man i första hand rengöra kammaren och se till så att den är torr. Man ska också kolla över dörrpackning så att den är hel och ren.

Efter detta så kör man ett vacuumtest, det kan ge en indikation på om systemet har ett läckage någonstans.

VIKTIGT: Se till så att printerpapper finns i autoklaven, det är ett hjälpmedel för att kunna utläsa om något värde inte stämmer på autoklaven.

Dessa instruktioner gäller för autoklav Newmed B23 och B60.

