

# S-Monovette®

## Aspirationsmetoden



1. Montera S-Monovette® på nålen och fixera den i de 3 fästtapparna genom att vrida medsols. Punktera venen.



2. Lösgör stasbandet och aspirera långsamt ut blodet med hjälp av pistongen. Skilj röret från nålen genom att vrida lätt motsols. Låt nålen sitta kvar i venen. Om fler prover ska tas, montera en ny S-Monovette® på nålen och upprepa förfarandet enligt beskrivningen ovan.



3. Skilj den sista S-Monovette® från nålen och dra sedan ut nålen från venen. Lås därefter pistongen i botten på röret (klick) och bryt därefter av pistongen.

## Vakuummetoden



1. Vakuumet i S-Monovette® bildas genom att låsa pistongen i botten på röret (klick) och därefter bryts pistongen av. Förbered de S-Monovette® du behöver för provtagningen.



2. Punktera venen. Lösgör stasbandet. Montera den prevakuerade S-Monovette® på nålen och fixera den i de 3 fästtapparna genom att vrida medsols.



3. Skilj röret från nålen genom att vrida lätt motsols. Låt nålen sitta kvar i venen. Om fler prover ska tas, montera en ny S-Monovette® på nålen och upprepa förfarandet enligt beskrivningen ovan. Skilj den sista S-Monovette® från nålen och dra sedan ut nålen från venen.

