



Viktig information före användning av värmematta Animat.

Läs före användning!

Även om Animat utvecklats för att tillföra patienten värme under operation utan att skada djuret, finns alltid **risken att djuret skadas**, framför allt om mattan inte används helt enligt anvisningarna.

Läs noga anvisningen som medföljer och tänk på att:

- Inte använda material som lagrar värme mellan matta och djuret
- Mattan inte får täcka djuret
- Mät djurets kroppstemperatur och gärna temperatur mellan matta och djur
- Låt inte djuret ligga i samma position under alltför lång tid

Tänk på att användning av Animat alltid sker på egen risk.