




0482

Descoton 2 % GDA

Desinfektionsmedel

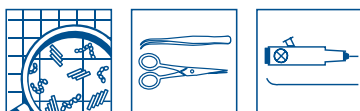

Användningsklart och snabbverkande desinfektionsmedel med ett brett spektrum av mikrobicid effekt som är skonsamt mot material och innehåller aktiverad 2 % glutaraldehyd.

Användningsområde För professionell användning inom hälsovården: Blötlägningsdesinfektion av instrument och spekulum. För desinfektion av särskilt ömtåliga redskap/material: bl.a. tandvårdens protetiska arbeten, gummi- och plastredskap, kirurgiska instrument, stela och böjbara endoskop samt endoskopiinstrument, optiska instrument, desinfektion av TEE-givare.

För professionell användning.

Produktegenskaper Användningsklart glutaraldehydbaserat desinfektionsmedel som tillverkas av tyska Dr. Schumacher GmbH för desinfektion av rengjorda instrument och redskap.

Undersökningar: Dr Brill, Hamburg: Examination of the bactericidal and fungicidal disinfection effectiveness, Expert report on the effectiveness against Mycobacterium terrae.

Dr Steinmann, virolog, Bremen: Expert report on Hepatitis C virucidal activity (BVDV). Expert report on Vaccinia virucidal activity.

Prof. Werner, Schwerin: Expert's report on sporicidal activity (Clostridium difficile).

Bruksanvisning Tvätta instrumenten/redskapen före desinfektion med en produkt som innehåller glutaraldehyd. Rengjorda redskap sänks ned i desinfektionsmedlet i ett blötlägningskärl med lock. Se till att instrumenten som ska desinficeras är helt täckta och att ämnet kommer åt eventuella kanaler, inre delar och alla ytorna. Vid instrumentdesinfektion är verkningstiden (kontakttiden) minst 5 minuter. Effekt på sporer fås med en verkningstid om 45 minuter. Efter verkningstiden sköljs redskapen (rent kranvatten/steril aqua) och torkas noggrant. Samma desinfektionslösning kan användas en dygn om lösningen är okulärt ren. Byt ut nedsmutsad lösning.

Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Glutaraldehyd	2 % Biocid

pH koncentrat 5.0 sur

Förvaring I rumstemperatur 3 år.

Tillverkningsland TYSKLAND

Användar- och miljö säkerhet Allvarliga tillbud orsakade av Descoton 2% GDA desinfektionsmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland).

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

3 x 5 l

8130

4260241965247

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.